

# ACTIVA

spring activator



**ACTIVA** è un prodotto che permette la riattivazione delle molle aperte in modo semplice, pratico ed estremamente rapido. Con **ACTIVA**, una volta stabilito lo spazio necessario per la riattivazione della molla, è sufficiente comprimerla verso uno dei due lati ed inserire l' **ACTIVA** dello spessore desiderato. In questo modo la molla, nuovamente compressa, riattiva la sua funzione di spinta.

## VANTAGGI

✓ **Risparmio nell'uso di materiale:** mantenimento della stessa molla precedentemente utilizzata.

✓ **Flessibilità di utilizzo:** scelta del livello di attivazione della molla desiderato grazie alle tre misure disponibili. Adatto ad ogni misura di arco ed utilizzabile in qualsiasi fase del trattamento. Aggiungendo altri Activa si può incrementare l'attivazione della molla durante la terapia.



✓ **Riduzione del tempo alla poltrona:** operazioni preliminari per la sostituzione della molla non più necessarie.

🕒 *Tempo alla poltrona (min : sec)*

15:50


0:52

senza ACTIVA ☹️


con ACTIVA 😊

✓ **Azione collaborativa nelle meccaniche:** a differenza dei comuni dispositivi da crimpare, Activa si chiude intorno al filo senza toccarlo permettendo una libera e completa azione di espansione della molla assecondando, così, le meccaniche di scivolamento.

## POSIZIONAMENTO

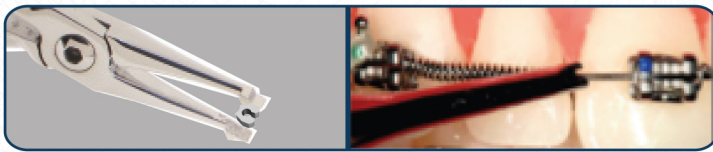

**Step 1:** Prendere ACTIVA con un qualsiasi strumento. Con un direzionatore comprimere la molla da uno dei due lati.

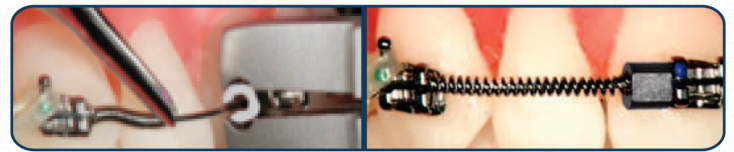

**Step 2:** Inserire Activa sulla parte di arco scoperto dalla molla e crimpare dolcemente, quindi rilasciare la molla.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
G30-01A	Attivatore molle da 1,0 mm	Conf. 20 pz.
G30-15A	Attivatore molle da 1,5 mm	Conf. 20 pz.
G30-20A	Attivatore molle da 2,0 mm	Conf. 20 pz.
G30-ACKIT	Kit attivatore molle (10 pz. per misura)	Conf. 30 pz.

